

arlyt[®]

EXPRESS

MULTIUSO

SOLUCIÓN MULTIPROPÓSITO ESTÉRIL E ISOTÓNICA PARA TODO TIPO DE LENTES DE CONTACTO BLANDAS. LIMPIADORA, DESINFECTANTE, CONSERVADORA, HUMECTANTE Y DE ENJUAGUE.

PRESENTACIÓN
120ml · 360 ml

VENTA LIBRE
Industria Argentina



Fórmula:

Cada 100 ml. de solución contiene:

PAPB 0,00015 g.

Poloxamer 407 0,015 g.

Edetato Disódico 2H₂O, Cloruro de Sodio,

Ácido Bórico, Agua purificada c.s.p. 100 ml.

Instrucciones Generales:

Antes de manipular las lentes de contacto lávese bien las manos con jabón neutro y enjuágueselas.

Modo de Uso Diario:

Una vez que haya lavado sus manos:

Paso 1: Sacar una lente de contacto y enjuagar durante algunos segundos con *Arlyt Express*.

Paso 2: Colocar en el portalentes una cantidad suficiente de *Arlyt Express* para cubrir enteramente la lente e introducir la que acaba de enjuagar.

Paso 3: No es necesario frotar la lente de contacto, realizarlo si su contactólogo lo recomienda. En ese caso, colocar 2 o 3 gotas en la lente de contacto y frotarla suavemente durante 20 segundos.

Paso 4: Retirar la otra lente y repetir las operaciones realizadas con la primera.

Paso 5: Dejar las lentes en el estuche cerrado durante toda la noche o al menos por 4 horas.

Paso 6: Antes de volver a colocarse las lentes, enjuagar durante algunos segundos con *Arlyt Express*.

Precauciones:

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Descartar el contenido del envase luego de 90 días de su apertura, y utilizar siempre solución nueva en su portalentes. No aceptar si el precinto de seguridad de la tapa ha sido violado o dañado. Guarde a temperatura ambiente inferior a 30° C. Proteger el producto de la luz. No refrigerar ni congelar.

