

arlyt[®]

PREMIUM

MULTIUSO CON HIALURONATO DE SODIO

SOLUCIÓN ESTÉRIL E ISOTÓNICA MULTIPROPÓSITO PARA LENTES BLANDAS DE HIDROGEL Y DE HIDROGEL SILICONA. LIMPIADORA, DESINFECTANTE, CONSERVADORA, HUMECTANTE, LUBRICANTE Y DE ENJUAGUE. ALTA CAPACIDAD DE HIDRATACIÓN DE EFECTO PROLONGADO

PRESENTACIÓN
120ml · 360 ml

VENTA LIBRE
Industria Argentina



Fórmula:

Cada 100 ml. de solución contiene:
Hialuronato de sodio.....0,10 g.,
Poloxamer 407.....0,010 g.,
PAPB0,00015g.
Edetato Disódico Dihidratado, Cloruro de Sodio,
Fosfato Disódico anhidro,
Fosfato Monosódico dihidratado,
Agua purificada c.s.p. 100 ml.

Instrucciones Generales:

Antes de manipular las lentes de contacto lávese bien las manos con jabón neutro y enjuáguelas.

Modo de Uso Diario:

Una vez que haya lavado sus manos:

Paso 1: Sacar una lente de contacto y enjuagarla durante algunos segundos con **Arlyt Premium**.

Paso 2: Colocar en el portales lentes una cantidad suficiente de **Arlyt Premium** para cubrir enteramente la lente e introducir la que acaba de enjuagar.

Paso 3: No es necesario frotar la lente de contacto, realizarlo si su contactólogo lo recomienda. En ese caso, colocar 2 o 3 gotas en la lente de contacto y frotarla suavemente durante 20 segundos.

Paso 4: Retirar la otra lente y repetir las operaciones realizadas con la primera.

Paso 5: Dejar las lentes en el estuche cerrado durante toda la noche o al menos por 4 horas.

Paso 6: Antes de volver a colocarse las lentes, enjuagar durante algunos segundos con **Arlyt Premium**.

Precauciones:

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Descartar el contenido del envase luego de 90 días de su apertura, y utilizar siempre solución nueva en su portales lentes. No aceptar si el precinto de seguridad de la tapa ha sido violado o dañado. Guarde a temperatura ambiente inferior a 30° C. Proteger el producto de la luz. No refrigerar ni congelar.