

arlyt[®]

RGP

MULTIUSO

PARA LENTES DE CONTACTO
RÍGIDAS Y GAS PERMEABLE

SOLUCIÓN LIMPIADORA, DESINFECTANTE, CONSERVADORA,
LUBRICANTE Y DE ENJUAGUE.

PRESENTACIÓN
120ml

VENTA LIBRE
Industria Argentina



Fórmula:

Cada 100 ml. de solución contiene:

Poloxamer 407.....50 mg.

PAPB0,15 mg.

Alcohol Polivinílico100 mg.

Edetato Disódico Dihidratado, CMC 300, Cloruro de Sodio, Fosfato Dibásico de sodio, Cloruro de potasio, Agua purificada c.s.p. 100 ml.

Instrucciones Generales:

Antes de manipular las lentes de contacto lávese bien las manos con jabón neutro y enjuáguelas.

Modo de Uso Diario:

Una vez que haya lavado sus manos:

Paso 1: Para limpiar sus lentes, colocar en la palma de la mano y aplicar 3 gotas de **Arlyt RGP** y sobre la superficie de cada uno, frotar suavemente con el dedo índice durante aproximadamente 15 a 20 segundos.

Paso 2: Enjuagar completamente para remover la suciedad de la superficie.

Paso 3: Colocar las lentes en el estuche, llenar con solución fresca. Dejar las lentes sumergidas por lo menos 4 horas o durante toda la noche. Sus lentes ahora pueden ser colocadas directamente sobre los ojos. Si usted desea, previo a su uso, pueden ser enjuagadas con la solución.

Precauciones:

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Descartar el contenido del envase luego de 90 días de su apertura, y utilizar siempre solución nueva en su portales. No aceptar si el precinto de seguridad de la tapa ha sido violado o dañado. Guarde a temperatura ambiente inferior a 30° C. Proteger el producto de la luz. No refrigerar ni congelar.

