



# arlyt<sup>®</sup> Fresh

## SOLUCIÓN HIDRATANTE OFTÁLMICA

SOLUCIÓN PARA LA HIDRATACIÓN DE LOS OJOS  
Y LENTES DE CONTACTO

PRESENT. | VENTA LIBRE  
15 ml | Industria Argentina

### Fórmula:

Cada 100 ml. de solución contiene:  
CMC 300 .....0,60 g.,  
PAPB .....0,00010 g.,  
Cloruro de Sodio, Cloruro de Calcio H<sub>2</sub>O, Cloruro de Magnesio  
6H<sub>2</sub>O, Cloruro de Potasio, Lactato de Sodio, Agua purificada  
c.s.p. 100 ml.



### Modo de Uso:

Instilar 1 ó 2 gotas en cada ojo tantas veces como sea necesario durante el día. Si utiliza lentes de contacto, colocar una gota en cada una antes de colocárselos.

**Precauciones:** Utilizar solamente si el precinto de seguridad está intacto. Una vez abierto utilizar dentro de los 30 días. Mantener a temperatura menor a 30°.

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

Autorizado por A.N.M.A.T. · P.M. Legajo Nº 2174-4 · Dirección Técnica: Dolores Martínez. MN:13083

BERPHARMA S.A. Luis Piedra Buena 5185 Promoción el Triángulo · Malvinas Argentinas · Provincia de Buenos Aires · Argentina



STERILE A




# arlyt<sup>®</sup> LUBRICANTE

## SOLUCIÓN OFTÁLMICA CON HIALURONATO DE SODIO

SOLUCIÓN PARA LA LUBRICACIÓN DE LOS OJOS  
Y LENTES DE CONTACTOS

PRESENT. | VENTA LIBRE  
15 ml | Industria Argentina

### Fórmula:

Cada 100 ml. de solución contiene:  
Hialuronato de Sodio...0,15 g.,  
PAPB .....0,00010 g.,  
Alcohol Polivinílico, Cloruro de Sodio, Fosfato Disódico  
anhidro, Fosfato Monosódico dihidratado, Edetato disódico  
dihidratado, Agua purificada c.s.p. 100 ml.



### Modo de Uso:

Instilar 1 ó 2 gotas en cada ojo tantas veces como sea necesario durante el día. Si utiliza lentes de contacto, colocar una gota en cada una antes de colocárselos.

**Precauciones:** Utilizar solamente si el precinto de seguridad está intacto. Una vez abierto utilizar dentro de los 30 días. Mantener a temperatura menor a 30°.

**Mantener fuera del alcance de los niños.**

Autorizado por A.N.M.A.T. · P.M. Legajo Nº 2174-5 · Dirección Técnica: Dolores Martínez. MN:13083

BERPHARMA S.A. Luis Piedra Buena 5185 Promoción el Triángulo · Malvinas Argentinas · Provincia de Buenos Aires · Argentina



STERILE A

